


## SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	<b>MV314A</b>
<b>Descrizione</b>	<b>MASCHERINA 3 VELI IN T.N.T.</b>



<b>Caratteristiche</b>	Mascherina chirurgica 3 veli tipo IIR, con elastici auricolari e barretta nasale modellabile. BFE $\geq$ 98%.
<b>Materiale</b>	Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)
<b>Colore</b>	Azzurra 
<b>Categoria DPI</b>	Dispositivo di Protezione Individuale di I categoria, solo per rischi minimi
<b>Conformità Normativa</b>	EN 14683:2019 – mascherina chirurgica di tipo IIR
<b>Imballo</b>	20 confezioni da 5x10 pezzi (1000 pezzi totali).
<b>Istruzioni</b>	Per un corretto utilizzo: igienizzare le mani, prendere la mascherina alle estremità o sulla parte superiore (non toccare con le mani gli strati in TNT in prossimità di narici e bocca) e posizionarla sul viso inserendo gli elastici dietro le orecchie (N.B. lo strato azzurro è quello esterno, il nasello in alluminio va posizionato sulla parte superiore). Fare in modo che la mascherina copra naso e bocca. Modellare il nasello in alluminio.
<b>Conservazione</b>	Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

Ultimo aggiornamento: 09.10.25



<b>Note</b>	<p>Verificare che l'imballo sia integro prima dell'utilizzo e prendere visione della scadenza. Indossare correttamente la mascherina in modo che copra naso e bocca.</p> <p>Il prodotto è monouso, non può essere quindi utilizzato ripetutamente o da più persone. Se allergici al tessuto non tessuto T.N.T. usare cautela o sospendere l'utilizzo. Smaltire il prodotto secondo le normative vigenti dopo il suo utilizzo.</p>
-------------	---

Ultimo aggiornamento: 09.10.25